

## Composizione del kit per la raccolta di tamponi buccali

### Contenuto del kit




### Condizioni di utilizzo


- ◆ I tamponi buccali sono monouso e devono essere utilizzati da un'unica persona.
- ◆ Assicurarsi di utilizzare i tamponi in ambiente pulito e di avere mani e faccia ben lavati.
- ◆ Per quanto non sia obbligatorio il digiuno, si consiglia di non ingerire cibo o acqua nell'ora precedente il prelievo di saliva.
- ◆ Non sputare saliva all'interno del tubetto porta tampone.
- ◆ Per avere il miglior campione di saliva possibile vi consigliamo di eseguire correttamente tutte le azioni di prelievo come indicato in queste istruzioni.
- ◆ Dopo avere effettuato il prelievo **NON** serve tenere il tampone in frigorifero.
- ◆ Consigliamo di spedire il box con i campioni il giorno successivo al prelievo e mai oltre i 3 giorni successivi.
- ◆ Si consiglia di non spedire il box al nostro laboratorio prima del weekend o di eventuali festività.
- ◆ L'invio del kit è **gratuito**, come anche l'invio dei campioni al nostro laboratorio.

# Istruzione per il prelievo

## 1 Utilizzo del kit di prelievo

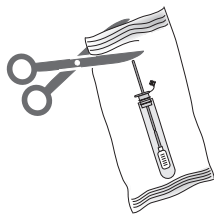


Aprire la confezione ed estrarre il primo tampone.

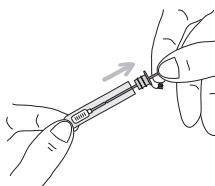


Estrarre il tampone dal tubetto insieme al tappo.

**Fare attenzione a non toccare con le mani il tampone bianco.**

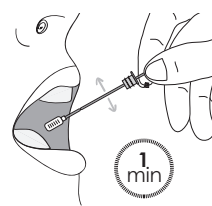


Inserire il tampone in bocca e sfregarlo con decisione contro la parete interna della guancia per almeno **1 minuto**. Eseguire la stessa operazione con il secondo tampone sulla guancia opposta.

## 2 Preparazione del kit

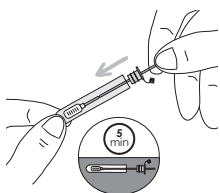


Inserire il tampone nel tubetto e, senza chiuderlo, lasciarlo asciugare per **5 minuti** su una superficie piana. **Non appoggiare mai il tampone su altre superfici.**

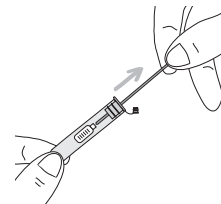

Spingere il tappo all'interno del tubetto e, tenendo quest'ultimo ben saldo, tirare verso l'esterno il bastoncino per staccare il tampone bianco finale.

## 3 Compilazione dei documenti

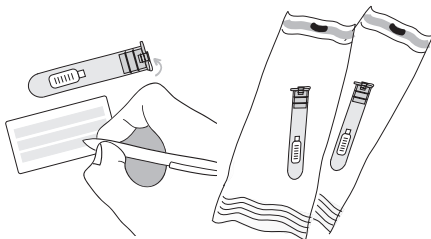



Sigillare il tubetto spingendo infine il piccolo cappuccio del tappo. Apporre sopra il tubetto l'etichetta con nome, cognome e data di nascita e infine inserirlo nella sua confezione.



Compilare e firmare il consenso per l'esecuzione del test genetico in ogni sua parte.



**NOTA BENE:** queste stesse informazioni verranno utilizzare per emettere fattura a vostro nome.

## 4 Compilazione dei documenti

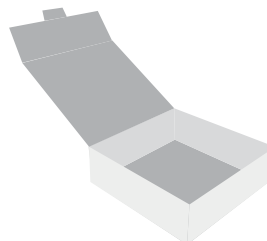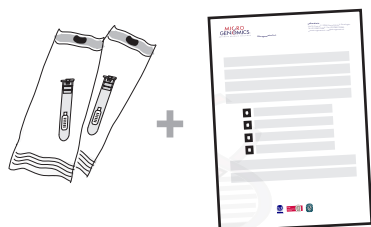

Inserire i 2 tamponi ben sigillati e il consenso informato firmato nel box di trasporto.

## 5 Spedizione del campione

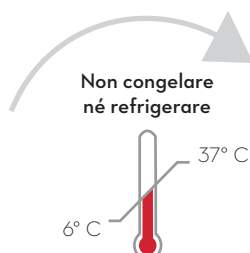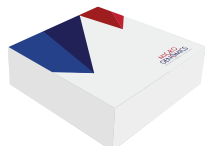

Inserire il box dentro la busta del Corriere Espresso già provvista di bolla di spedizione.

Recarsi in un centro di ritiro del Corriere Espresso oppure contattarci al 0382 1753184 per programmare il ritiro.